

# color

## Kit de recolección de muestra sin supervisión de COVID-19

Instrucciones en sitio

### Antes de comenzar:

- Debe llevar su muestra a su punto asignado de recolección de muestra el mismo día que la tomó.
- Asegúrese de que hoy haya recolección de muestras. Verifique con su recolector de muestras de COVID-19 que hoy aceptarán muestras.
- No pierda la última recogida de muestras. Verifique con su recolector de muestras de COVID-19 a qué hora será la última recolección de muestras.
- ¡Asegúrese de lavar sus manos!

### Su kit incluye:



Hisopo



Tubo de recolección



Tarjeta con código de barra



Bolsa de bioseguridad

1

#### Active su kit en línea en [color.com/covid/activate](https://color.com/covid/activate).

Necesita el código de barra único, que está en su tubo de recolección de muestra.




! **Advertencia: No se realizará la prueba a su muestra si el kit no está activado.**

2

#### Antes de recolectar su muestra, lave bien sus manos por 20 segundos y séquelas bien.


3

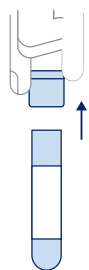

### Retire la tapa del tubo de recolección.

Mantenga cerca la tapa.

4

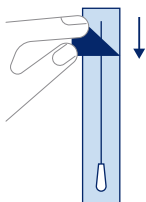


### Abra el empaque del hisopo.

Comience por el extremo del mango del hisopo, tire del papel para abrirlo. Saque el hisopo de su empaque agarrándolo por el mango.

**Nota:** No toque la punta suave con sus manos ni la ponga sobre una superficie.

5

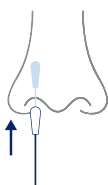


### Gire la punta del hisopo en una fosa nasal, 3 veces.

Introdúzcalo en una fosa nasal hasta que la punta suave ya no sea visible, alrededor de 1 pulgada (2.5 cm). Gírelo en círculo alrededor del borde interior de su fosa nasal al menos 3 veces.

**Nota:** No fuerce el hisopo para ir más adentro.

6

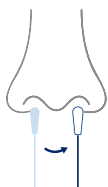

### Gire la punta del hisopo en la otra fosa nasal, 3 veces.

Repita el paso anterior en la segunda fosa nasal, usando el mismo extremo del hisopo.

**Nota:** Usará el mismo hisopo en ambas fosas nasales.


7



### Guarde el hisopo en el tubo de recolección.

Debe introducir primero la punta suave del hisopo que introdujo en su nariz.

8

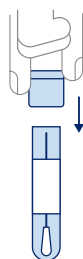

### Presione la tapa del tubo de recolección para cerrar.

¡Casi ha terminado! Asegúrese de que la parte superior esté bien cerrada.

**Nota:** Después de cerrar el tubo de recolección, lave bien sus manos por 20 segundos y séquelas bien.

9



### Coloque el tubo de recolección dentro de la bolsa de bioseguridad.

Selle la bolsa para cerrarla.

10



### Lleve la bolsa de bioseguridad al punto de recolección de prueba que le han asignado.

Su recolector de prueba de COVID-19 le mostrará dónde depositar su muestra.

**Nota:** Si hoy pierde la última hora de recogida, pida un nuevo kit a su recolector de prueba de COVID-19.

## Verifique antes de regresar su kit si:

- ¿Activó su kit?
- ¿Recolectó muestra de ambas fosas nasales?

Visite [color.com/sample-return](https://color.com/sample-return) para conocer más.

### ¿Preguntas?

Visite [support.color.com](https://support.color.com) o contáctenos en [support@color.com](mailto:support@color.com) o (844) 352-6567.

## Antes de comenzar:

- Debe llevar su muestra a su punto asignado de recolección de muestra el mismo día que la tomó.
- Asegúrese de que hoy haya recolección de muestras. Verifique con su recolector de muestras de COVID-19 que hoy aceptarán muestras.
- No pierda la última recogida de muestras. Verifique con su recolector de muestras de COVID-19 a qué hora será la última recolección de muestras.
- ¡Asegúrese de lavar sus manos!

## Su kit incluye:



Hisopo



Tubo de recolección



Tarjeta con código de barra



Bolsa de bioseguridad

1

Active su kit en línea en [color.com/covid/activate](https://color.com/covid/activate).

Necesita el código de barra único, que está en su tubo de recolección de muestra.



! **Advertencia:** No se realizará la prueba a su muestra si el kit no está activado.

2

Antes de recolectar su muestra, lave bien sus manos por 20 segundos y séquelas bien.

3

Retire la tapa del tubo de recolección.

Mantenga cerca la tapa.





4

Abra el empaque del hisopo.

Comience por el extremo del mango del hisopo, tire del papel para abrirlo. Saque el hisopo de su empaque agarrándolo por el mango.

**Nota:** No toque la punta suave con sus manos ni la ponga sobre una superficie.

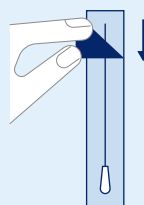

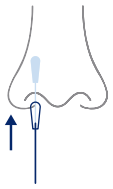


5

### Gire la punta del hisopo en una fosa nasal, 3 veces.

Introdúzcalo en una fosa nasal hasta que la punta suave ya no sea visible, alrededor de 1 pulgada (2.5 cm). Gírelo en círculo alrededor del borde interior de su fosa nasal al menos 3 veces.

**Nota:** No fuerce el hisopo para ir más adentro.

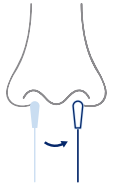

6

### Gire la punta del hisopo en la otra fosa nasal, 3 veces.

Repita el paso anterior en la segunda fosa nasal, usando el mismo extremo del hisopo.

**Nota:** Usará el mismo hisopo en ambas fosas nasales.

7

### Guarde el hisopo en el tubo de recolección.

Debe introducir primero la punta suave del hisopo que introdujo en su nariz.




8

### Presione la tapa del tubo de recolección para cerrar.

¡Casi ha terminado! Asegúrese de que la parte superior esté bien cerrada.

**Nota:** Después de cerrar el tubo de recolección, lave bien sus manos por 20 segundos y séquelas bien.

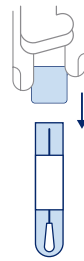

9

### Coloque el tubo de recolección dentro de la bolsa de bioseguridad.

Selle la bolsa para cerrarla.



10

### Lleve la bolsa de bioseguridad al punto de recolección de prueba que le han asignado.

Su recolector de prueba de COVID-19 le mostrará dónde depositar su muestra.

**Nota:** Si hoy pierde la última hora de recogida, pida un nuevo kit a su recolector de prueba de COVID-19.



## Verifique antes de regresar su kit si:

- ¿Activó su kit?
- ¿Recolectó muestra de ambas fosas nasales?

Visite [color.com/sample-return](https://color.com/sample-return) para conocer más.

### ¿Preguntas?

Visite [support.color.com](https://support.color.com) o contáctenos en [support@color.com](mailto:support@color.com) o (844) 352-6567.

Solo para usar en Rx, solo para usar para diagnóstico In Vitro, para emergencia, use solo con autorización. Este kit de recolección casero no ha sido aprobado ni admitido por la FDA. Este kit de recolección casero ha sido autorizado por la FDA en EE. UU.

Este kit de recolección casero ha sido autorizado solo para recolección de muestra casera y mantenimiento de muestras nasales como una ayuda para detectar el ácido nucleico de SARS-CoV-2, no ha sido diseñado para otros virus opatógenos.

Este kit de recolección casero solo está autorizado por el tiempo que dura la declaración de que existen las circunstancias que justifican la autorización del uso de diagnósticos in vitro como emergencia para detectar/odiagnosticar el COVID-19 bajo la Sección 564(b)(1) de la Ley, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), a menos que se termine o se revoque antes dicha autorización.